

Ficha técnica

Servilletas Premium

Descripción:

Las servilletas premium llevan 3 capas. Fabricadas con dos capas de celulosa de alta absorción acoplada a una de polietileno, de esta forma consiguen una mayor impermeabilidad y protección.

Características:

- Servilleta de 3 capas
- Celulosa + Polietileno (16g papel + 16g papel + 9g film)
- Gran absorción, resistencia e impermeabilidad
- Tamaño 33x45cm
- Disponible en 9 colores

Presentación:

Descripción	Color	Medida	EAN 13	Contenido
Servilleta premium 3 capas	Naranja	33x45cm	8435454003987	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Amarilla	33x45cm	8435454003994	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Negra	33x45cm	8435454004083	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Rosa	33x45cm	8435454004090	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Violeta	33x45cm	8435454004106	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Celeste	33x45cm	8435454004113	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Verde	33x45cm	8435454004120	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Lima	33x45cm	8435454004137	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn
Servilleta premium 3 capas	Azul oscuro	33x45cm	8435454004151	50 servilletas/bolsa, 10 bolsas/Ctn

Normativa:

- Reglamento (UE) 2017/745

Almacenamiento:

- Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.



SUNMED TECHNOLOGY SL
CIF: B01654029
AV. DE LAS MORCILLERAS 33
28343 VALDEMORO, MADRID
Tel +34-913 892 300
+34-913 892 301

Instrucciones de uso

Servilletas Premium

Preparación:

1. Higiene personal: Antes de manipular la servilleta, lave y desinfecte sus manos.
2. Verificación del producto: Inspeccione la servilleta para asegurar de que esté limpia, seca y en buen estado. Deseche cualquier unidad que presente daños o signos de contaminación.

Colocación:

1. Colocación del paciente: haga que el paciente se siente cómodamente en la silla dental.
2. Posición del babero: Despliegue la servilleta y colóquela frente al pecho del paciente, con el lado absorbente hacia fuera.
3. Fijación:
 - Si utiliza clips o cadenas: Enganche los extremos de la servilleta a los clips y colóquelos alrededor del cuello del paciente de manera ajustada, pero sin causar incomodidad.
 - Si usa adhesivos, pegue la servilleta sobre la ropa o la bata del paciente.

Durante el procedimiento:

1. Asegúrese de que la servilleta permanezca en su lugar.
2. Si es necesario, reacomode o reemplace la servilleta durante procedimientos prolongados o si esta se moja en exceso.

Retiro:

1. Con cuidado, retire los clips o despegue la servilleta, evitando que los residuos entren en contacto con el paciente.
2. Deseche la servilleta en un contenedor adecuado para desechos clínicos.

Advertencias:

1. Si el paciente tiene alergias conocidas a materiales específicos, asegúrese de que la servilleta esté libre de esos componentes.
2. Este producto no sustituye a los equipos de protección personal para el odontólogo o su asistente.
3. Úselo exclusivamente en el entorno dental para el propósito indicado.



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL
CIF: B01654029
AV. DE LAS MORCILLERAS 33
28343 VALDEMORO, MADRID
Tel +34-913 892 300
+34-913 892 301

Información Logística

Servilletas Premium

EAN 13

8435454003987

8435454003994

8435454004083

8435454004090

8435454004113

8435454004106

8435454004137


8435454004151

8435454004120



Bolsa:


Presentación: 50 servilletas/bolsa

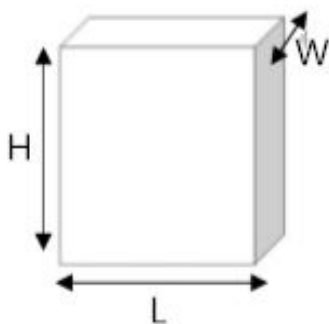

Cartón:

Presentación: 500 servilletas/Ctn;

Tamaño de cartón: 36.5cm x 20.5cm x 29.5cm

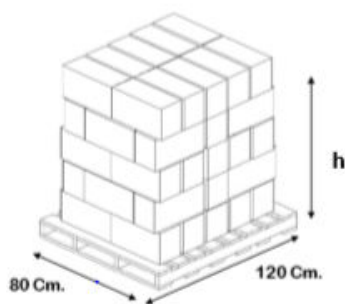

Palé:

Palé para almacenar:

Presentación: 72 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx196cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 80 Ctns/palé;

Tamaño de palé: 120cmx80cmx218cm(h)



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECNOLOGY SL

CIF: B01654029

AV. DE LAS MORCILLERAS 33

28343 VALDEMORO, MADRID

Tel +34-913 892 300

+34-913 892 301